


MANUAL DE INSTRUÇÕES

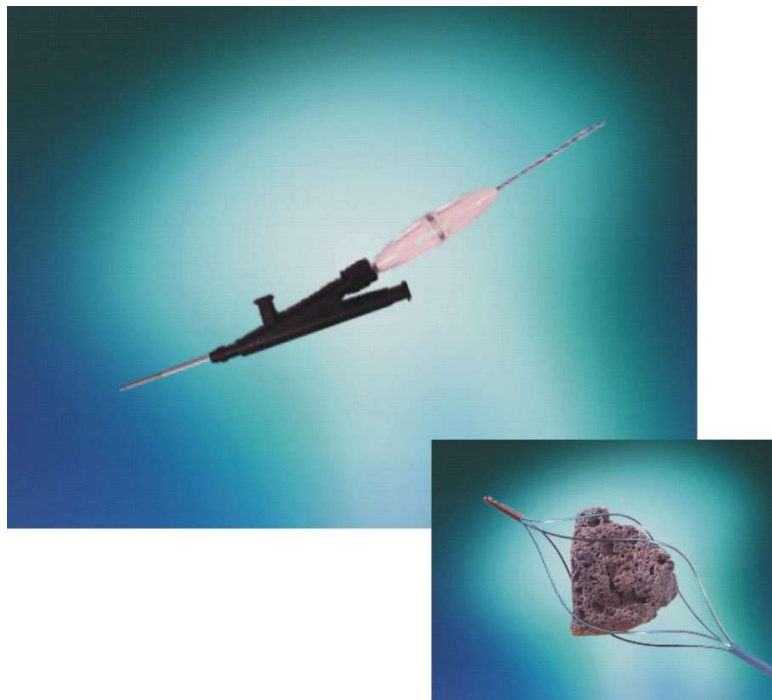

PINÇA EXTRATORA COM CANAL DE TRABALHO – BASKET – P.I
803 297 200 32

Guarde o Manual de Instruções em lugar seguro e de fácil acesso.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES	3
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO	3
CONDIÇÕES DE TRANSPORTE	3
ADVERTÊNCIA	3
FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	3
APLICAÇÕES	3
MANUAL DE INSTRUÇÕES	4
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	4
COMPOSIÇÃO	4
INDICAÇÃO DE USO	5
CONTRAINDICAÇÃO	5
ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO	5
ACESSÓRIOS	11
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ACESSÓRIOS SUGERIDOS	12
PRECAUÇÕES	12
INSTRUÇÃO PARA O USO CORRETO E SEGURO	12
DESEMBALAGEM	12
MONTAGEM DO EQUIPAMENTO	13
EQUIPAMENTO BÁSICO	13
TÉCNICA CIRÚRGICA	13
DESCARTE	15

INFORMAÇÕES

Atenção: Produto Estéril. Método de Esterilização: Óxido de Etileno.

PRODUTO DE USO ÚNICO – DESCARTAR APÓS O USO – PROIBIDO REPROCESSAR

Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada

A Pinça Extratora com Canal de Trabalho – Basket – P.I é um instrumental cirúrgico fabricado com componentes especialmente desenvolvidos para uso médico.

Os produtos da Russer são esterilizados por Óxido de Etileno, de acordo com as normas ISO 11135 (Esterilização de produtos para saúde).

As instruções presentes neste manual foram feitas para orientação. Este manual não substitui treinamentos ou cursos de intervenção cirúrgica;

Caso houver alguma dúvida sobre o equipamento entrar em contato com seu Representante.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Guardar a Pinça Extratora com Canal de Trabalho – Basket – P.I com o cesto de Nitinol aberto, em embalagem de tamanho adequado ao equipamento. Este tipo de armazenamento protege a Pinça Extratora com Canal de Trabalho contra dobras e conserva a forma do cesto de Nitinol. Armazenar em local seco, sem umidade excessiva e longe da incidência de raios solares e poeira.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

Transportar a Pinça Extratora com Canal de Trabalho – Basket – P.I em uma embalagem adequada para não danificar o cesto de Nitinol.

ADVERTÊNCIA

A Russer não assume nenhuma responsabilidade relativa a produtos reutilizados, reprocessados ou reesterilizados, já que a realização dos mesmos pode comprometer a integridade estrutural e/ou levar à falha do dispositivo. Este dispositivo é fornecido estéril.

O uso deste produto deve ser restrito à profissional com competência para a utilização do mesmo. Deve-se ter cuidado a fim de prevenir perfuração ou trauma dos revestimentos e tecidos, canais ou ductos associados.

A aplicação de força excessiva poderá danificar o dispositivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

A Pinça Extratora com Canal de Trabalho – Basket – P.I pode ou não estar acondicionada em uma forma plástica de PETG, e posteriormente colocada em embalagem de papel grau cirúrgica ou Tyvek®. A embalagem secundária é de caixa de papelão branca em dimensões adequadas para protegê-la de choques e quedas até o momento do uso, contendo:

- 01 Pinça Extratora com Canal de Trabalho - Basket – P.I, Modelo xxxxxxxxxxxx;
- 01 Manual de Instruções impresso ou para consulta através do caminho eletrônico site: www.russer.com.br/manuais/80329720032.pdf de acordo com a instrução normativa IN nº 4 de 15 de junho de 2012, podendo ser solicitada a via impressa sem custo através do nosso SAC.

APLICAÇÕES

A Pinça Extratora com Canal de Trabalho – Basket – P.I foi desenvolvida para endoscopia e só deve ser utilizada dentro de sua área, por médicos qualificados e treinados.

A Pinça Extratora com Canal de Trabalho – Basket – P.I tem como finalidade a apreensão, e extração de litíase (cálculos do sistema urinário e biliar) e corpos estranhos através de um só instrumento.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Este manual de instrução tem a finalidade de oferecer informações necessárias para a utilização correta da Pinça Extratora com Canal de Trabalho – Basket – P.I.

Recomendamos ler cuidadosamente este manual de instruções antes de usar seu equipamento, ele contém especificações e informações necessárias que ajudarão no manuseio do equipamento com segurança e eficácia.

Para qualquer dúvida em relação ao equipamento ou ao manual de instruções, por favor, entrar em contato com seu representante.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Pinça Extratora com Canal de Trabalho – Basket – P.I é constituída de:

1. Corpo da basket com entradas para Probe, Basket e encaixe para a irrigação tipo luer lock;
2. Camisa de aço inox (ABNT NBR 13911:2013) fixado no corpo da basket (1);
3. Tensor traseiro da Basket;
4. Cesta (Basket) de Nitinol de 4 fios;
5. Torquer;
6. Entrada para probe ou outro acessório a ser empregado;
7. Canal de irrigação com entrada tipo luer lock;

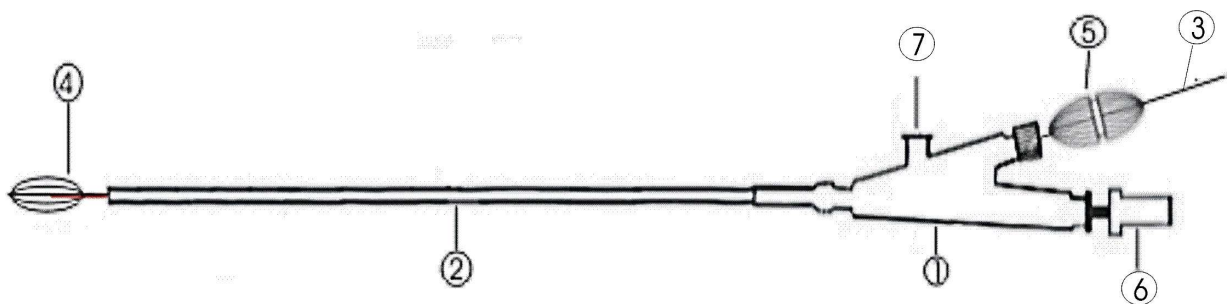


Figura 1- Pinça Extratora com Canal de Trabalho – Basket – PI

COMPOSIÇÃO

Camisa – Aço inox; Tensor Flexível e Cesto Basket – Nitinol; Corpo da Basket – Polietileno grau médico.

Nota: O Nitinol apresenta um alto grau de memória mecânica, isto é, mesmo que seja submetido à força de deformação ele volta à sua posição original.

INDICAÇÃO DE USO

As pinças são indicadas para a apreensão, e extração de litíase (cálculos do sistema urinário e biliar) e corpos estranhos.

CONTRAINDICAÇÃO

É contraindicado em todos os casos onde não possa ser utilizado como procedimento proposto de retirada de litíase e/ou corpo estranho.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO

A Pinça Extratora com Canal de Trabalho – Basket – P.I possui diferentes modelos. Os diferentes modelos disponíveis são codificados de acordo com o exposto na tabela 1.

Tabela 1 - Modelos

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO
BASKET 4 FIOS – FRENCH	
U 2 25 56 4	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 25 60 4	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, 60cm comprimento
U 2 25 40 4	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, 40cm comprimento
U 2 3 40 4	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, 40cm comprimento
U 2 3 56 4	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 3 60 4	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, 60cm comprimento
U 2 45 56 4	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 45 60 4	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, 60cm comprimento
U 2 5 56 4	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 5 60 4	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, 60cm comprimento
N 2 3 22 4	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, 22cm comprimento
N 2 5 22 4	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, 22cm comprimento
N 2 3 37 4	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
N 2 41 37 4	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
N 2 45 37 4	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
N 2 5 37 4	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
N 2 8 34 4	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, 34cm comprimento
N 2 8 40 4	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, 40cm comprimento
N 2 8 42 4	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, 42cm comprimento
N 2 8 45 4	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, 45cm comprimento
BASKET 4 FIOS TIPLESS – FRENCH	
U 2 25 56 4T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios Tipless, 56cm comprimento
U 2 25 60 4T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, 60cm comprimento
U 2 25 40 4T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, 40cm comprimento
U 2 3 40 4T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Tipless, 40cm comprimento
U 2 3 56 4T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 3 60 4T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Tipless, 60cm comprimento
U 2 45 56 4T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 45 60 4T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, 60cm comprimento
U 2 5 56 4T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 5 60 4T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, Tipless, 60cm comprimento
N 2 3 22 4T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, Tipless, 22cm comprimento
N 2 5 22 4T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, Tipless, 22cm comprimento
N 2 3 37 4T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 41 37 4T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 4 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 45 37 4T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 5 37 4T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 8 34 4T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Tipless, 34cm comprimento
N 2 8 40 4T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Tipless, 40cm comprimento
N 2 8 42 4T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Tipless, 42cm comprimento

BASKET 3 FIOS – FRENCH	
U 2 25 56 3	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, 56cm comprimento
U 2 25 60 3	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, 60cm comprimento
U 2 25 40 3	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, 40cm comprimento
U 2 3 40 3	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, 40cm comprimento
U 2 3 56 3	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, 56cm comprimento
U 2 3 60 3	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, 60cm comprimento
U 2 45 56 3	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, 56cm comprimento
U 2 45 60 3	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, 60cm comprimento
U 2 5 56 3	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fios, 56cm comprimento
U 2 5 60 3	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fios, 60cm comprimento
N 2 3 22 3	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 3 fios, 22cm comprimento
N 2 5 22 3	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 3 fios, 22cm comprimento
N 2 3 37 3	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 3 fios, 37cm comprimento
N 2 41 37 3	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 3 fios, 37cm comprimento
N 2 45 37 3	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 3 fios, 37cm comprimento
N 2 5 37 3	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 3 fios, 37cm comprimento
N 2 8 34 3	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, 34cm comprimento
N 2 8 40 3	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, 40cm comprimento
N 2 8 42 3	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, 42cm comprimento
N 2 8 45 3	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, 45cm comprimento
BASKET 3 FIOS TIPLESS – FRENCH	
U 2 25 56 3T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 25 60 3T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, 60cm comprimento
U 2 25 40 3T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, 40cm comprimento
U 2 3 40 3T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Tipless, 40cm comprimento
U 2 3 56 3T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 3 60 3T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Tipless, 60cm comprimento
U 2 45 56 3T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 45 60 3T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, 60cm comprimento
U 2 5 56 3T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 5 60 3T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fios, Tipless, 60cm comprimento
N 2 3 22 3T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 3 fios, Tipless, 22cm comprimento
N 2 5 22 3T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 3 fios, Tipless, 22cm comprimento
N 2 3 37 3T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 3 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 41 37 3T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 3 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 45 37 3T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 5 37 3T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 3 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 8 34 3T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Tipless, 34cm comprimento
N 2 8 40 3T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Tipless, 40cm comprimento
N 2 8 42 3T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Tipless, 42cm comprimento
N 2 8 45 3T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Tipless, 45cm comprimento
BASKET 6 FIOS – FRENCH	
U 2 25 56 6	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, 56cm comprimento
U 2 25 60 6	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, 60cm comprimento
U 2 25 40 6	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, 40cm comprimento
U 2 3 40 6	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, 40cm comprimento
U 2 3 56 6	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, 56cm comprimento
U 2 3 60 6	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, 60cm comprimento
U 2 45 56 6	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, 56cm comprimento
U 2 45 60 6	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, 60cm comprimento
U 2 5 56 6	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, 56cm comprimento
U 2 5 60 6	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, 60cm comprimento
N 2 3 22 6	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, 22cm comprimento
N 2 5 22 6	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, 22cm comprimento
N 2 3 37 6	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, 37cm comprimento
N 2 41 37 6	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 6 fios, 37cm comprimento
N 2 45 37 6	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 6 fios, 37cm comprimento
N 2 5 37 6	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, 37cm comprimento
N 2 8 34 6	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, 34cm comprimento

N 2 8 40 6	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, 40cm comprimento
N 2 8 42 6	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, 42cm comprimento
N 2 8 45 6	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, 45cm comprimento
BASKET 6 FIOS TIPLESS – FRENCH	
U 2 25 56 6T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 25 60 6T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 60cm comprimento
U 2 25 40 6T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 40cm comprimento
U 2 3 40 6T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, Tipless, 40cm comprimento
U 2 3 56 6T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 3 60 6T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, Tipless, 60cm comprimento
U 2 45 56 6T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 45 60 6T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 60cm comprimento
U 2 5 56 6T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 5 60 6T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 60cm comprimento
N 2 3 22 6T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, Tipless, 22cm comprimento
N 2 5 22 6T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 22cm comprimento
N 2 3 37 6T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 41 37 6T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 45 37 6T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 5 37 6T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 8 34 6T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, 34cm comprimento
N 2 8 40 6T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, 40cm comprimento
N 2 8 42 6T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, 42cm comprimento
N 2 8 45 6T	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, 45cm comprimento
BASKET 4 FIOS HEXAGONAL – FRENCH	
U 2 25 56 4H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, hexagonal, 56cm comprimento
U 2 25 60 4H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, hexagonal, 60cm comprimento
U 2 25 40 4H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, hexagonal, 40cm comprimento
U 2 3 40 4H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, hexagonal, 40cm comprimento
U 2 3 56 4H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, hexagonal, 56cm comprimento
U 2 3 60 4H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, hexagonal, 60cm comprimento
U 2 45 56 4H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, hexagonal, 56cm comprimento
U 2 45 60 4H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, hexagonal, 60cm comprimento
U 2 5 56 4H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, hexagonal, 56cm comprimento
U 2 5 60 4H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, hexagonal, 60cm comprimento
N 2 3 22 4H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, hexagonal, 22cm comprimento
N 2 5 22 4H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, hexagonal, 22cm comprimento
N 2 3 37 4H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, hexagonal, 37cm comprimento
N 2 41 37 4H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 4 fios, hexagonal, 37cm comprimento
N 2 45 37 4H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 4 fios, hexagonal, 37cm comprimento
N 2 5 37 4H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, hexagonal, 37cm comprimento
N 2 8 34 4H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, hexagonal, 34cm comprimento
N 2 8 40 4H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, hexagonal, 40cm comprimento
N 2 8 42 4H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, hexagonal, 42cm comprimento
N 2 8 45 4H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, hexagonal, 45cm comprimento
BASKET 4 FIOS TIPLESS HEXAGONAL- FRENCH	
U 2 25 56 4TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios Tipless, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 25 60 4TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 60cm comprimento
U 2 25 40 4TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 40cm comprimento
U 2 3 40 4TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 40cm comprimento
U 2 3 56 4TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 3 60 4TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 60cm comprimento
U 2 45 56 4TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 45 60 4TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 60cm comprimento
U 2 5 56 4TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 5 60 4TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 60cm comprimento
N 2 3 22 4TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 22cm comprimento
N 2 5 22 4TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 22cm comprimento
N 2 3 37 4TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 37cm comprimento
N 2 41 37 4TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 37cm comprimento

N 2 45 37 4TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal,37cm comprimento
N 2 5 37 4TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal,37cm comprimento
N 2 8 34 4TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal,34cm comprimento
N 2 8 40 4TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal,40cm comprimento
N 2 8 42 4TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal,42cm comprimento
BASKET 3 FIOS HEXAGONAL – FRENCH	
U 2 25 56 3H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, hexagonal,56cm comprimento
U 2 25 60 3H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, hexagonal, 60cm comprimento
U 2 25 40 3H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, hexagonal, 40cm comprimento
U 2 3 40 3H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, hexagonal,40cm comprimento
U 2 3 56 3H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, hexagonal,56cm comprimento
U 2 3 60 3H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, hexagonal,60cm comprimento
U 2 45 56 3H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, hexagonal, 56cm comprimento
U 2 45 60 3H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, hexagonal,60cm comprimento
U 2 5 56 3H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fios, hexagonal,56cm comprimento
U 2 5 60 3H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fios, hexagonal,60cm comprimento
N 2 3 22 3H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 3 fios, hexagonal,22cm comprimento
N 2 5 22 3H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 3 fios, hexagonal,22cm comprimento
N 2 3 37 3H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 3 fios, hexagonal,37cm comprimento
N 2 41 37 3H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø41Fr, Basket 3 fios, hexagonal,37cm comprimento
N 2 45 37 3H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 3 fios, hexagonal,37cm comprimento
N 2 5 37 3H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 3 fios, hexagonal,22cm comprimento
N 2 8 34 3H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, hexagonal,34cm comprimento
N 2 8 40 3H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, hexagonal,40cm comprimento
N 2 8 42 3H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, hexagonal,42cm comprimento
N 2 8 45 3H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, hexagonal,45cm comprimento
BASKET 3 FIOS TIPLESS HEXAGONAL – FRENCH	
U 2 25 56 3TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 25 60 3TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, hexagonal, 60cm comprimento
U 2 25 40 3TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Hexagonal, 40cm comprimento
U 2 3 40 3TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Tipless, Hexagonal, 40cm comprimento
U 2 3 56 3TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Tipless, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 3 60 3TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Tipless, Hexagonal, 60cm comprimento
U 2 45 56 3TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, hexagonal,56cm comprimento
U 2 45 60 3TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, hexagonal,60cm comprimento
U 2 5 56 3TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fios, Tipless, hexagonal,56cm comprimento
U 2 5 60 3TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Hexagonal,60cm comprimento
N 2 3 22 3TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 3 fios, Tipless, Hexagonal,22cm comprimento
N 2 5 22 3TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 3 fios, Tipless, hexagonal,22cm comprimento
N 2 3 37 3TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 3 fios, Tipless, hexagonal,37cm comprimento
N 2 41 37 3TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 3 fios, Tipless, hexagonal,37cm comprimento
N 2 45 37 3TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, hexagonal,37cm comprimento
N 2 5 37 3TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Hexagonal,37cm comprimento
N 2 8 34 3TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Tipless, Hexagonal,34cm comprimento
N 2 8 40 3TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Tipless, Hexagonal,40cm comprimento
N 2 8 42 3TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Tipless, Hexagonal,42cm comprimento
N 2 8 45 3TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Tipless, Hexagonal,45cm comprimento
BASKET 6 FIOS HEXAGONAL- FRENCH	
U 2 25 56 6H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, hexagonal,56cm comprimento
U 2 25 60 6H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, hexagonal,60cm comprimento
U 2 25 40 6H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, hexagonal,40cm comprimento
U 2 3 40 6H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, hexagonal,40cm comprimento
U 2 3 56 6H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, hexagonal, 56cm comprimento
U 2 3 60 6H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, hexagonal, 60cm comprimento
U 2 45 56 6H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, Hexagonal,56cm comprimento
U 2 45 60 6H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, Hexagonal,60cm comprimento
U 2 5 56 6H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Hexagonal,56cm comprimento
U 2 5 60 6H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Hexagonal,60cm comprimento
N 2 3 22 6H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, Hexagonal, 22cm comprimento
N 2 5 22 6H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, Hexagonal,22cm comprimento

N 2 3 37 6H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, Hexagonal, 37cm comprimento
N 2 41 37 6H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 6 fios, Hexagonal, 37cm comprimento
N 2 45 37 6H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 6 fios, Hexagonal, 37cm comprimento
N 2 5 37 6H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, Hexagonal, 37cm comprimento
N 2 8 34 6H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Hexagonal, 34cm comprimento
N 2 8 40 6H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Hexagonal, 40cm comprimento
N 2 8 42 6H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Hexagonal, 42cm comprimento
N 2 8 45 6H	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Hexagonal, 45cm comprimento
BASKET 6 FIOS TIPLESS HEXAGONAL – FRENCH	
U 2 25 56 6TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 25 60 6TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 60cm comprimento
U 2 25 40 6TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 40cm comprimento
U 2 3 40 6TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 40cm comprimento
U 2 3 56 6TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 3 60 6TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 60cm comprimento
U 2 45 56 6TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 45 60 6TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 60cm comprimento
U 2 5 56 6TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 5 60 6TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 60cm comprimento
N 2 3 22 6TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 22cm comprimento
N 2 5 22 6TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 22cm comprimento
N 2 3 37 6TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 37cm comprimento
N 2 41 37 6TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 37cm comprimento
N 2 45 37 6TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 37cm comprimento
N 2 5 37 6TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 37cm comprimento
N 2 8 34 6TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 34cm comprimento
N 2 8 40 6TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 40cm comprimento
N 2 8 42 6TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 42cm comprimento
N 2 8 45 6TH	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 45cm comprimento
BASKET 4 FIOS ELIPTICA – FRENCH	
U 2 25 56 4E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 25 60 4E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 60cm comprimento
U 2 25 40 4E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 40cm comprimento
U 2 3 40 4E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 40cm comprimento
U 2 3 56 4E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 3 60 4E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 60cm comprimento
U 2 45 56 4E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 45 60 4E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 60cm comprimento
U 2 5 56 4E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 5 60 4E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 60cm comprimento
N 2 3 22 4E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 22cm comprimento
N 2 5 22 4E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 22cm comprimento
N 2 3 37 4E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 37cm comprimento
N 2 41 37 4E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 37cm comprimento
N 2 45 37 4E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 37cm comprimento
N 2 5 37 4E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 37cm comprimento
N 2 8 34 4E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 34cm comprimento
N 2 8 40 4E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 40cm comprimento
N 2 8 42 4E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 42cm comprimento
N 2 8 45 4E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 45cm comprimento
BASKET 4 FIOS TIPLESS ELIPTICA– FRENCH	
U 2 25 56 4TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 25 60 4TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 60cm comprimento
U 2 25 40 4TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 40cm comprimento
U 2 3 40 4TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 40cm comprimento
U 2 3 56 4TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 3 60 4TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 60cm comprimento
U 2 45 56 4TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 45 60 4TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 60cm comprimento
U 2 5 56 4TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 56cm comprimento

U 2 5 60 4TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica,60cm comprimento
N 2 3 22 4TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica,22cm comprimento
N 2 5 22 4TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica,22cm comprimento
N 2 3 37 4TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica,37cm comprimento
N 2 41 37 4TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica,37cm comprimento
N 2 45 37 4TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica,37cm comprimento
N 2 5 37 4TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica,37cm comprimento
N 2 8 34 TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica,34cm comprimento
N 2 8 40TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica,40cm comprimento
N 2 8 42 TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica,42cm comprimento
BASKET 3 FIOS ELIPTICA – FRENCH	
U 2 25 56 3E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Eliptica,56cm comprimento
U 2 25 60 3E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Eliptica, 60cm comprimento
U 2 25 40 3E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Eliptica, 40cm comprimento
U 2 3 40 3E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Eliptica,40cm comprimento
U 2 3 56 3E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Eliptica,56cm comprimento
U 2 3 60 3E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Eliptica,60cm comprimento
U 2 45 56 3E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 45 60 3E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, Eliptica,60cm comprimento
U 2 5 56 3E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fios, Eliptica,56cm comprimento
U 2 5 60 3E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fiosEliptica,60cm comprimento
N 2 3 22 3E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 3 fiosEliptica,22cm comprimento
N 2 5 22 3E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 3 fios, Eliptica,22cm comprimento
N 2 3 37 3E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 3 fiosEliptica,37cm comprimento
N 2 41 37 3E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 3 fiosEliptica,37cm comprimento
N 2 45 37 3E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 3 fiosEliptica,37cm comprimento
N 2 5 37 3E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 3 fios, Eliptica,37cm comprimento
N 2 8 34 3E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Eliptica,34cm comprimento
N 2 8 40 3E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Eliptica,40cm comprimento
N 2 8 42 3E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Eliptica,42cm comprimento
N 2 8 45 3E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Eliptica,45cm comprimento
BASKET 3 FIOS TIPLESS ELIPTICA – FRENCH	
U 2 25 56 3TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,56cm comprimento
U 2 25 60 3TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,60cm comprimento
U 2 25 40 3TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,40cm comprimento
U 2 3 40 3TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica, 40cm comprimento
U 2 3 56 3TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 3 60 3TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,60cm comprimento
U 2 45 56 3TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,56cm comprimento
U 2 45 60 3TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,60cm comprimento
U 2 5 56 3TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,56cm comprimento
U 2 5 60 3TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,60cm comprimento
N 2 3 22 3TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,22cm comprimento
N 2 5 22 3TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,22cm comprimento
N 2 3 37 3TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,37cm comprimento
N 2 41 37 3TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,37cm comprimento
N 2 45 37 3TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,37cm comprimento
N 2 5 37 3TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,37cm comprimento
N 2 8 34 3TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,34cm comprimento
N 2 8 40 3TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,40cm comprimento
N 2 8 42 3TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,42cm comprimento
N 2 8 45 3TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,45cm comprimento
BASKET 6 FIOS ELIPTICA- FRENCH	
U 2 25 56 6E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, Eliptica,56cm comprimento
U 2 25 60 6E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, Eliptica,60cm comprimento
U 2 25 40 6E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, Eliptica, 40cm comprimento
U 2 3 40 6E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, Eliptica, 40cm comprimento
U 2 3 56 6E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 3 60 6E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, Eliptica, 60cm comprimento
U 2 45 56 6E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, Eliptica,56cm comprimento

U 2 45 60 6E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, Eliptica,60cm comprimento	
U 2 5 56 6E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Eliptica,56cm comprimento	
U 2 5 60 6E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Eliptica ,60cm comprimento	
N 2 3 22 6E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, Eliptica, 22cm comprimento	
N 2 5 22 6E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, Eliptica,22cm comprimento	
N 2 3 37 6E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, Eliptica, 37cm comprimento	
N 2 41 37 6E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 6 fios, Eliptica, 37cm comprimento	
N 2 45 37 6E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 6 fios, Eliptica, 37cm comprimento	
N 2 5 37 6E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, Eliptica,37cm comprimento	
N 2 8 34 6E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Eliptica ,34cm comprimento	
N 2 8 40 6E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Eliptica, 40cm comprimento	
N 2 8 42 6E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Eliptica, 42cm comprimento	
N 2 8 45 6E	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Eliptica ,45cm comprimento	
BASKET 6 FIOS TIPLESS ELIPTICA – FRENCH		
U 2 25 56 6TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica,56cm comprimento	
U 2 25 60 6TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica, 60cm comprimento	
U 2 25 40 6TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica,40cm comprimento	
U 2 3 40 6TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica ,40cm comprimento	
U 2 3 56 6TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica,56cm comprimento	
U 2 3 60 6TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica ,60cm comprimento	
U 2 45 56 6TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica,56cm comprimento	
U 2 45 60 6TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica ,60cm comprimento	
U 2 5 56 6TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica, 56cm comprimento	
U 2 5 60 6TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica,60cm comprimento	
N 2 3 22 6TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica ,22cm comprimento	
N 2 5 22 6TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica I, 22cm comprimento	
N 2 3 37 6TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica ,37cm comprimento	
N 2 41 37 6TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica ,37cm comprimento	
N 2 45 37 6TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica ,37cm comprimento	
N 2 5 37 6TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica I, 37cm comprimento	
N 2 8 34 6TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica,34cm comprimento	
N 2 8 40 6TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless Eliptica,40cm comprimento	
N 2 8 42 6TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica,42cm comprimento	
N 2 8 45 6TE	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica ,45cm comprimento	
Significado das letras no final dos códigos:		
- Exemplos: X X XX XX A = ...arredondas...		
X X XX XX FI = ...flexível, inox...		
A – Arredondas	H – Hexagonal	I – Inox
F – Flexível	T – Tipless	E – Elíptica

ACESSÓRIOS

- Probe
- Litotriptor
- Ureterorenoscópio
- Ureteroscópio

AVISO: O modelo do Probe deverá ser de acordo com o modelo do Litotriptor e Pinça Extratora escolhidos. (Verificar o diâmetro correto de todo o sistema). Os acessórios mencionados não fazem parte do objeto deste registro devendo ser adquiridos separadamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ACESSÓRIOS SUGERIDOS

Probe	Comprimento de trabalho	74 cm
	Diâmetro externo	2,4 Fr – extralarga
Ureterorrenoscópio	Comprimento útil	43 cm
	Canal de Trabalho	5 Fr
Ureteroscópio	Comprimento útil	33 cm
	Canal de Trabalho	5 Fr

PRECAUÇÕES

Ler o Manual de Instruções com atenção, antes de usar o equipamento.

O produto é esterilizado por óxido de etileno. Produto de uso único. Descartar após o uso. Proibido reprocessar.

Não utilize a PINÇA EXTRATORA COM CANAL DE TRABALHO – BASKET – P.I se o cesto de Nitinol estiver danificado.

Não deixar a PINÇA EXTRATORA COM CANAL DE TRABALHO – BASKET – P.I entrar em contato com equipamento elétrico.

Utilizar a PINÇA EXTRATORA COM CANAL DE TRABALHO – BASKET – P.I somente para apreensão, e extração de cálculos.

O procedimento de apreensão, e extração com a PINÇA EXTRATORA COM CANAL DE TRABALHO – BASKET – P.I destina-se somente a profissionais qualificados.

INSTRUÇÃO PARA O USO CORRETO E SEGURO

A PINÇA EXTRATORA COM CANAL DE TRABALHO – BASKET – P.I deve ser utilizada por profissionais devidamente treinados e qualificados para o procedimento. O profissional deve desenvolver um método de aplicação, que segundo sua experiência seja o mais adequado, levando em conta o bem-estar e a segurança do paciente.


Durante os procedimentos cirúrgicos devem-se evitar esforços excessivos, que podem acarretar em quebra dos componentes.

DESEMBALAGEM

Desembale cuidadosamente a PINÇA EXTRATORA COM CANAL DE TRABALHO – BASKET – P.I e verifique se o dispositivo se encontra completo ou se não há danos.

Antes de cada procedimento inspecionar o dispositivo:

- Verificar se a embalagem do produto está danificada ou aberta, caso ocorra, descarte imediatamente o produto;
- Certificar de que os componentes do equipamento estão montados corretamente;
- Verificar as condições do produto: se a cesta não se encontra rompida ou amassada, e se o movimento de abertura e fechamento da cesta de Nitinol está operacional.

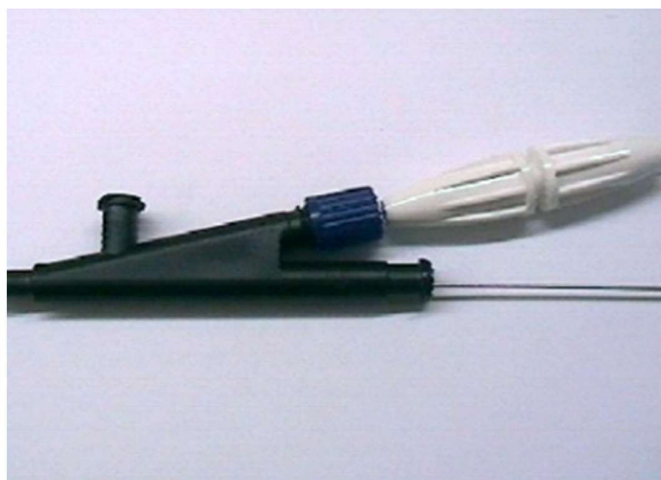MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

Introduzir o PROBE no corpo da Pinça Extratora no canal reto.

EQUIPAMENTO BÁSICO

- 1 Pinça Extratora;
- 1 Camisa com canal de trabalho;
- 1 Torquer;
- 1 Manual de Instruções.

TÉCNICA CIRÚRGICA

1. Preparação do Instrumento:
 - Utilizando uma técnica asséptica, remover o instrumento da embalagem;
 - Avance lentamente a pinça para extração de cálculo fechada pelo canal de trabalho do endoscópio até que a mesma apareça na ponta distal do endoscópio;
2. Procedimento de retirada do cálculo:
 - O procedimento deve ser realizado utilizando técnicas assépticas apropriadas;
 - Prepare o local, conforme necessário. Deve ser administrada uma anestesia adequada antes do procedimento;
 - Antes de introduzir a pinça verifique se a cesta está recolhida (fig.2).

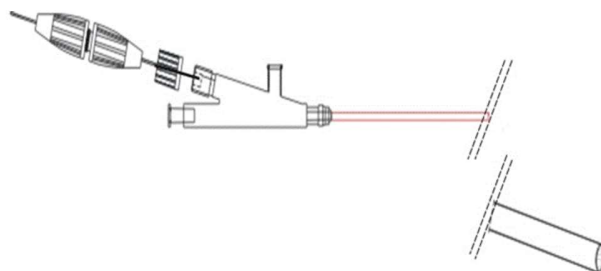


Figura 2

- Introduza a ponta da pinça recolhida (fig.3) no canal de trabalho do endoscópio;

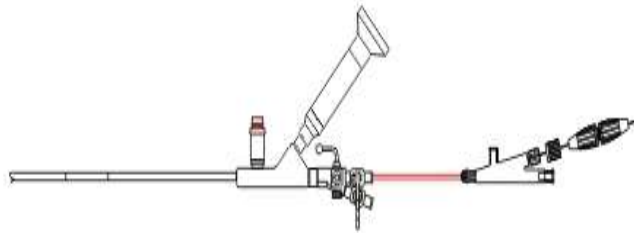


Figura 3

- Avance lentamente pelo canal de trabalho até a mesma aparecer na ponta distal do endoscópio (fig.4);

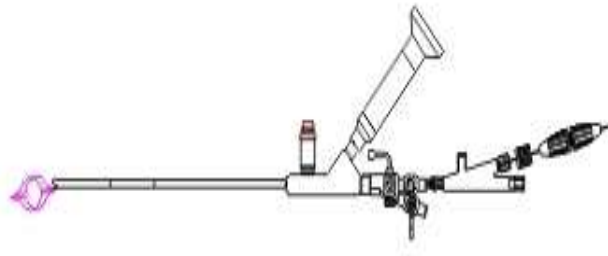


Figura 4

- Avance lentamente a pinça pelo canal de trabalho até encontrar o cálculo ou corpo estranho a ser retirado;
- Uma vez encontrado o cálculo ou corpo estranho, deve apreendê-lo na cesta retraindo a cesta e girando o torquer para fixar no cálculo ou corpo estranho (fig.5);

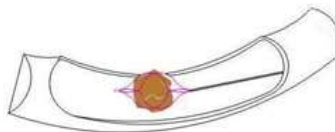


Figura 5

- Constatado a apreensão do cálculo, introduzir o Probe pelo canal de trabalho do endoscópio (fig.6);

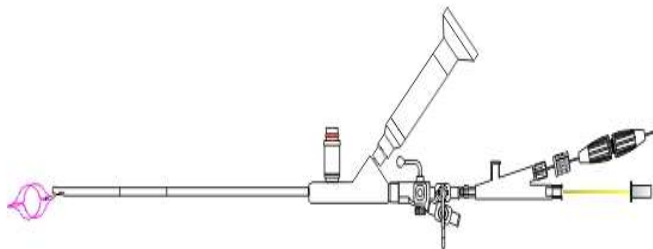


Figura 6

- Avance lentamente o Probe até encontrar o cálculo apreendido (fig.7), acionar o Litotriptor para fragmentar o cálculo;

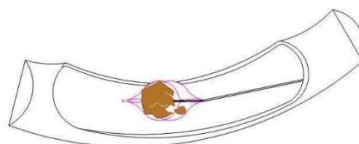


Figura 7

- Após a fragmentação, retire o Probe do canal do endoscópio, e depois a cesta com o cálculo apreendido ou corpo estranho;
- Se for necessária mais retirada de cálculos ou corpos estranhos, repita o procedimento.

DESCARTE

Considerando que o produto entra em contato com fluidos corporais, existe o risco de contaminação biológica e transmissão de doenças virais. Portanto, após o uso o mesmo deve ser tratado como material potencialmente contaminante.

Seguir as regras para descarte de produtos potencialmente contaminantes, de acordo com os padrões hospitalares.

PRODUTO ESTÉRIL E DE USO ÚNICO – DESCARTAR APÓS O USO.

PROIBIDO REPROCESSAR.

Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Responsável Legal: Juan Ruben Calbucoy Oliarte

Responsável Técnico: Carlos Roberto Weffort - CREA-SP 0601559401

Registro ANVISA nº: 803 297 200 32

Fabricado e distribuído por: Russer Brasil Ltda.

Rua Antônia Martins Luiz, Nº 589 – Distrito Industrial João Narezzi – Indaiatuba – SP

SAC: Serviço de atendimento ao consumidor – 0800 17 00 07.