

MANUAL DE INSTRUÇÕES



**PINÇA EXTRATORA SEMIRRÍGIDA – BASKET – P.I
803 297 200 38**

Guarde o Manual de Instruções em lugar seguro e de fácil acesso.

ÍNDICE

INFORMAÇÕES	3
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO	3
CONDIÇÕES DE TRANSPORTE	3
ADVERTÊNCIA	3
FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	3
APLICAÇÕES	3
MANUAL DE INSTRUÇÕES	3
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	4
COMPOSIÇÃO	4
INDICAÇÃO DE USO	4
CONTRAIINDICAÇÃO	4
ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO	4
ACESSÓRIOS	12
PRECAUÇÕES	12
INSTRUÇÃO PARA O USO CORRETO E SEGURO	12
DESEMBALAGEM.....	12
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO EQUIPAMENTO	12
EQUIPAMENTO BÁSICO	12
TÉCNICA CIRÚRGICA	12
DESCARTE	13

INFORMAÇÕES

A Pinça Extratora Semirrígida – Basket – P.I foi desenvolvida para endoscopia e só deve ser utilizada dentro de sua área, por médicos qualificados e treinados.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Guardar a Pinça Extratora Semirrígida – Basket – P.I com o cesto de Nitinol aberto, em sua embalagem original que provê tamanho adequado ao equipamento. Este tipo de armazenamento protege a Pinça Extratora Semirrígida – Basket contra dobras e conserva a forma do cesto de Nitinol.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

Transportar a Pinça Extratora Semirrígida – Basket – P.I sempre em sua embalagem original e fechada, a qual é adequada para não danificar o cesto de Nitinol.

ADVERTÊNCIA

A Russer não assume nenhuma responsabilidade relativa a produtos reutilizados, reprocessados ou reesterilizados, já que a realização dos mesmos pode comprometer a integridade estrutural e/ou levar à falha do dispositivo.

Este dispositivo é fornecido estéril.

O uso deste produto deve ser restrito a profissionais com competência para a utilização do mesmo. Deve-se ter cuidado a fim de prevenir perfuração ou trauma dos revestimentos e tecidos, canais ou ductos associados.

A aplicação de força excessiva poderá danificar o dispositivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

A Pinça Extratora Semirrígida - Basket - P.I pode ou não estar acondicionada em blister de PET e posteriormente colocada em embalagem de papel grau cirúrgico ou Tyvek®. A embalagem secundária é de caixa de papelão em dimensões adequadas para protegê-la de choques e quedas até o momento do uso, contendo:

- 01 Pinça Extratora Semi-Rígida - Basket - P.I, Modelo xxxxxxxxxxxx.
- 01 Manual de Instruções impresso ou para consulta através do caminho eletrônico site:
www.russer.com.br/manuais/80329720038.pdf de acordo com a instrução normativa IN nº 4 de 15 de junho de 2012, podendo ser solicitada a via impressa sem custo através do nosso SAC: 0800 17 00 07.

APLICAÇÕES

A Pinça Extratora Semirrígida – Basket – P.I tem como finalidade a extração de litíases (cálculos do sistema urinário e biliar) e corpos estranhos através de procedimentos endoscópicos.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Este manual de instrução tem a finalidade de oferecer informações necessárias para a utilização correta da Pinça Extratora Semirrígida – Basket – P.I. Recomendamos ler cuidadosamente este manual de instruções antes de usar seu equipamento.

O Manual de Instruções contém especificações e informações necessárias que ajudarão no manuseio do

equipamento com segurança e eficácia.

Para qualquer dúvida em relação ao equipamento ou ao manual de instruções, por favor, entrar em contato com seu representante.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Pinça Extratora Semirrígida – Basket – P.I. é constituída de:

1. Empunhadura;
2. Suporte da Camisa da Basket (interno);
3. Camisa (externo);
4. Cesta de Nitinol de 3, 4, 6 fios.

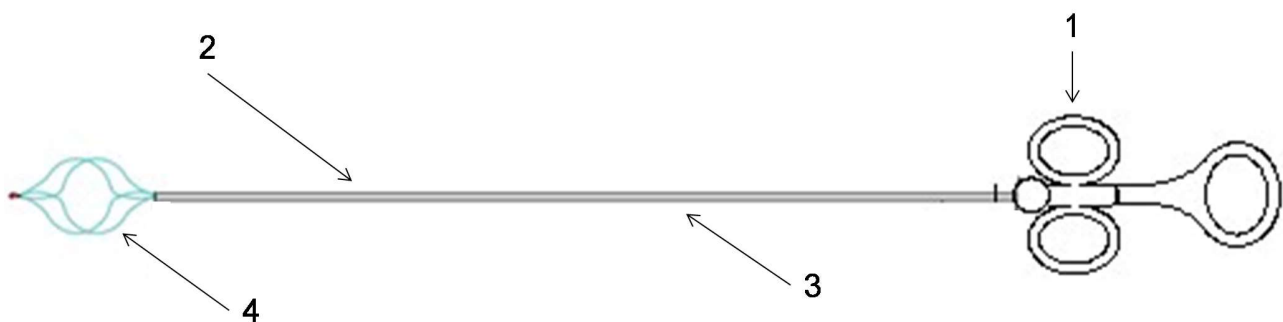


Figura 1- Pinça Extratora Semirrígida – Basket – PI

COMPOSIÇÃO

Empunhadura – Polietileno; Suporte da camisa da Basket - Aço Inox ABNT NBR 13911:2013; Camisa - Aço Inox ABNT NBR 13911:2013; Cesta (Basket) - Nitinol; São fornecidas estéreis por óxido de etileno (ETO).

INDICAÇÃO DE USO

As pinças são indicadas para a apreensão, e extração de litíase (cálculos do sistema urinário e biliar) e corpos estranhos.

CONTRAINDICAÇÃO

Não se aplica.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO

A Seringa de Insuflação e Deflação possuem diferentes modelos. Os diferentes modelos disponíveis são codificados de acordo com o exposto na tabela 1.

Tabela 1 - Modelos

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO
U 2 25 56 3 S Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, 56cm comprimento
U 2 25 56 3 S Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, 56cm comprimento
U 2 25 56 3 S Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, 56cm comprimento
U 2 3 22 3 S Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 3Fr, Basket 3 fios, 22cm comprimento
U 2 3 22 3 S Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 3Fr, Basket 3 fios, 22cm comprimento
U 2 3 22 3 S Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 3Fr, Basket 3 fios, 22cm comprimento

N 2 10 45 3ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 10Fr, Basket 3 fios, Tipless, 45cm comprimento
N 2 11 37 3ST Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 11Fr, Basket 3 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 11 37 3ST Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 11Fr, Basket 3 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 11 37 3ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 11Fr, Basket 3 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 11 40 3 ST Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 11Fr, Basket 3 fios, Tipless, 40cm comprimento
N 2 11 40 3 ST Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 11Fr, Basket 3 fios, Tipless, 40cm comprimento
N 2 11 40 3 ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 11Fr, Basket 3 fios, Tipless, 40cm comprimento
N 2 11 45 3ST Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 11Fr, Basket 3 fios, Tipless, 45cm comprimento
N 2 11 45 3ST Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 11Fr, Basket 3 fios, Tipless, 45cm comprimento
N 2 11 45 3ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 11Fr, Basket 3 fios, Tipless, 45cm comprimento
U 2 25 56 S Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 25 56 S Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 25 56 S Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 3 22 S Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 3Fr, Basket 4 fios, 22cm comprimento
U 2 3 22 S Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 3Fr, Basket 4 fios, 22cm comprimento
U 2 3 22 S Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 3Fr, Basket 4 fios, 22cm comprimento
N 2 3 22 4S Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 3Fr, Basket 4 fios, 22cm comprimento
N 2 3 22 4S Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 3Fr, Basket 4 fios, 22cm comprimento
N 2 3 22 4S Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 3Fr, Basket 4 fios, 22cm comprimento
U 2 3 56 S Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 3Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 3 56 S Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 3Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 3 56 S Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 3Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 45 56 S Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 45 56 S Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 45 56 S Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 5 22 S Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 4 fios, 22cm comprimento
U 2 5 22 S Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 4 fios, 22cm comprimento
U 2 5 22 S Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 4 fios, 22cm comprimento
U 2 5 56 S Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 5 56 S Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 5 56 S Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 25 56 4 S Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 25 56 4 S Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 25 56 4 S Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
N 2 3 37 4 S Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 3Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
N 2 3 37 4 S Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 3Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
N 2 3 37 4 S Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 3Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
U 2 3 56 4 S Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 3Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 3 56 4 S Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 3Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 3 56 4 S Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 3Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
N 2 41 37 4 S Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 4.1Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
N 2 41 37 4 S Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 4.1Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
N 2 41 37 4 S Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 4.1Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
N 2 45 37 4 S Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
N 2 45 37 4 S Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
N 2 45 37 4 S Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
U 2 45 56 4 S Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 45 56 4 S Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 45 56 4 S Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
N 2 5 22 4 S Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 4 fios, 22cm comprimento
N 2 5 22 4 S Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 4 fios, 22cm comprimento
N 2 5 22 4 S Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 4 fios, 22cm comprimento
N 2 5 37 4 S Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
N 2 5 37 4 S Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
N 2 5 37 4 S Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
U 2 5 56 4 S Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 5 56 4 S Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 5 56 4 S Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
N 2 7 37 4 S Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 7Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
N 2 7 37 4 S Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 7Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
N 2 7 37 4 S Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 7Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento

N 2 41 37 6ST Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 4.1Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 41 37 6ST Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 4.1Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 41 37 6ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 4.1Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N2 45 37 6ST Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N2 45 37 6ST Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N2 45 37 6ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
U 2 45 56 6ST Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 45Fr, Basket 6 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 45 56 6ST Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 45Fr, Basket 6 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 45 56 6ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 45Fr, Basket 6 fios, Tipless, 56cm comprimento
N 2 5 22 6ST Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 22cm comprimento
N 2 5 22 6ST Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 22cm comprimento
N 2 5 22 6ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 22cm comprimento
N 2 5 37 6ST Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 5 37 6ST Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 5 37 6ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
U 2 5 56 6ST Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 5 56 6ST Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 5 56 6ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 56cm comprimento
N 2 7 37 6 ST Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 7Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 7 37 6 ST Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 7Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 7 37 6 ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 7Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 7 40 6ST Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 7Fr, Basket 6 fios, Tipless, 40cm comprimento
N 2 7 40 6ST Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 7Fr, Basket 6 fios, Tipless, 40cm comprimento
N 2 7 40 6ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 7Fr, Basket 6 fios, Tipless, 40cm comprimento
N 2 7 45 6ST Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 7Fr, Basket 6 fios, Tipless, 45cm comprimento
N 2 7 45 6ST Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 7Fr, Basket 6 fios, Tipless, 45cm comprimento
N 2 7 45 6ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 7Fr, Basket 6 fios, Tipless, 45cm comprimento
N 2 8 37 6 ST Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 8 37 6 ST Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 8 37 6 ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 8 40 6 ST Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, 40cm comprimento
N 2 8 40 6 ST Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, 40cm comprimento
N 2 8 40 6 ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, 40cm comprimento
N 2 8 45 6 ST Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, 45cm comprimento
N 2 8 45 6 ST Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, 45cm comprimento
N 2 8 45 6 ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, 45cm comprimento
N 2 10 37 6 ST Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 10Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 10 37 6 ST Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 10Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 10 37 6 ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 10Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 10 40 6 ST Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 10Fr, Basket 6 fios, Tipless, 40cm comprimento
N 2 10 40 6 ST Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 10Fr, Basket 6 fios, Tipless, 40cm comprimento
N 2 10 40 6 ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 10Fr, Basket 6 fios, Tipless, 40cm comprimento
N 2 10 45 6 ST Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 10Fr, Basket 6 fios, Tipless, 45cm comprimento
N 2 10 45 6 ST Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 10Fr, Basket 6 fios, Tipless, 45cm comprimento
N 2 10 45 6 ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 10Fr, Basket 6 fios, Tipless, 45cm comprimento
N 2 11 37 6 ST Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 11Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 11 37 6 ST Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 11Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 11 37 6 ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 11Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 11 40 6 ST Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 11Fr, Basket 6 fios, Tipless, 40cm comprimento
N 2 11 40 6 ST Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 11Fr, Basket 6 fios, Tipless, 40cm comprimento
N 2 11 40 6 ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 11Fr, Basket 6 fios, Tipless, 40cm comprimento
N 2 11 45 6 ST Y1	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 11Fr, Basket 6 fios, Tipless, 45cm comprimento
N 2 11 45 6 ST Y2	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 11Fr, Basket 6 fios, Tipless, 45cm comprimento
N 2 11 45 6 ST Y3	Pinça Extratora Semi-rígida, Ø 11Fr, Basket 6 fios, Tipless, 45cm comprimento

Significado das letras no final dos códigos:

Exemplos: X X XX XX **S** = ...Semi-rígida
 X X XX XX **ST** = ...Semi-rígida/Tipless

S – Semi-Rígida**T** – Tipless**Y1** – Empunhadura em Polietileno (PE) – 1 dedo**Y2** – Empunhadura em Polietileno (PE) – 2 dedos**Y3** – Empunhadura em Polietileno (PE) – 3 dedos

ACESSÓRIOS

Não se aplica.

PRECAUÇÕES

Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou danificada.

Não utilizar o produto com prazo de validade vencido.

O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim senão aquele que especificamente se destina.

Prepare todos os materiais e equipamentos de proteção pessoal que serão utilizados com o instrumento de acordo com os seus respectivos manuais de instrução. Os equipamentos de proteção pessoal apropriados podem incluir: Proteção ocular, máscara facial, roupas resistentes à umidade e luvas resistentes a produtos químicos.

Após a retirada dos produtos da embalagem, inspecione-os a fim de detectar a existência de dobras, torções ou outros danos. Se for detectada qualquer anomalia que impossibilite o seu funcionamento em boas condições os produtos não devem ser utilizados. Entrar em contato com a Russer.

Certificar-se de que a descrição e dimensões do produto são adequadas ao procedimento a ser realizado.

Para manter o dispositivo livre de contaminantes, use luvas sem pó e abra-o em ambiente o mais limpo possível.

INSTRUÇÃO PARA O USO CORRETO E SEGURO

DESEMBALAGEM

Desembale cuidadosamente a Pinça Extratora Semi-rígida – Basket – P.I e verifique se o dispositivo se encontra completo ou se não há danos.

Verificar se a embalagem do produto está danificada ou aberta, caso ocorra, descarte imediatamente o produto.

Certificar que os componentes do equipamento estão montados corretamente, se a cesta não se encontra quebrada ou amassada e se o movimento de abertura e fechamento da cesta de Nitinol está funcionando.

Recusar o equipamento se os fios da cesta apresentar deformações ou alterações no formato.

INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

As instruções presentes neste manual foram feitas para orientação. Este manual não substitui treinamentos ou cursos de intervenção cirúrgica.

A pinça é fornecida montada e pronta para uso.

Caso houver alguma dúvida entrar em contato com seu representante.

EQUIPAMENTO BÁSICO

- Pinça Extratora Semirrígida – Basket – P.I;

TÉCNICA CIRÚRGICA

A Pinça Extratora Semirrígida – Basket – P.I deve ser utilizada por profissionais devidamente treinados e qualificados para o procedimento.

O profissional deve desenvolver um método de aplicação, que segundo sua experiência seja o mais adequado, levando em conta o bem-estar e a segurança do paciente.


Durante os procedimentos cirúrgicos devem-se evitar esforços excessivos, que podem acarretar a quebra dos componentes.

1. Preparação do Instrumento:

- Utilizando uma técnica asséptica, remover o instrumento da embalagem;
- Avance lentamente a pinça extratora fechada pelo canal de trabalho do endoscópio até que a mesma apareça na ponta distal do endoscópio.

2. Procedimento de retirada do cálculo ou corpos estranhos:

- O procedimento deve ser realizado utilizando técnicas assépticas apropriadas;
- Prepare o local, conforme necessário. Deve ser administrada uma anestesia adequada antes do procedimento.
- Antes de introduzir a pinça verifique se a cesta está recolhida;
- Introduza a ponta da pinça recolhida no canal de trabalho do endoscópio. Avance lentamente pelo canal de trabalho até a mesma aparecer na ponta distal do endoscópio;
- Avance lentamente a pinça pelo canal de trabalho até encontrar o cálculo ou corpo estranho a ser retirado;

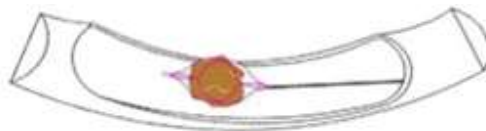**Figura 2**

- Uma vez encontrado o cálculo ou corpo estranho, deve apreendê-lo na cesta retraíndo a empunhadura, girando o conjunto para fixar no cálculo (figura 2);
- Constatado a apreensão do cálculo ou corpo estranho, introduzir o probe pelo canal de trabalho do endoscópio;
- Avance lentamente o probe até encontrar o cálculo apreendido, acionar o litotriptor para fragmentar o cálculo;
- Após a fragmentação, retire o probe do canal do endoscópio, e depois a pinça com o cálculo ou corpo estranho apreendido;
- Se for necessária mais retirada de cálculos ou corpos estranhos, repita o procedimento.

DESCARTE

Considerando que o produto entra em contato com fluidos corporais, existe o risco de contaminação biológica e transmissão de doenças virais. Portanto, após o uso o mesmo deve ser tratado como material potencialmente contaminante.

Seguir as regras para descarte de produtos potencialmente contaminantes, de acordo com os padrões hospitalares.

PRODUTO ESTÉRIL E DE USO ÚNICO – DESCARTAR APÓS O USO.

PROIBIDO REPROCESSAR.

Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.

Responsável Legal: Juan Ruben Calbucoy Oliarte

Responsável Técnico: Carlos Roberto Weffort - CREA-SP 0601559401

Registro ANVISA nº: 803 297 200 38

Fabricado e distribuído por: Russer Brasil Ltda.

Rua Antônia Martins Luiz, Nº 589 – Distrito Industrial João Narezzi – Indaiatuba/SP – 13.347-404

SAC: Serviço de atendimento ao consumidor – 0800 17 00 07.