


MANUAL DE INSTRUÇÕES

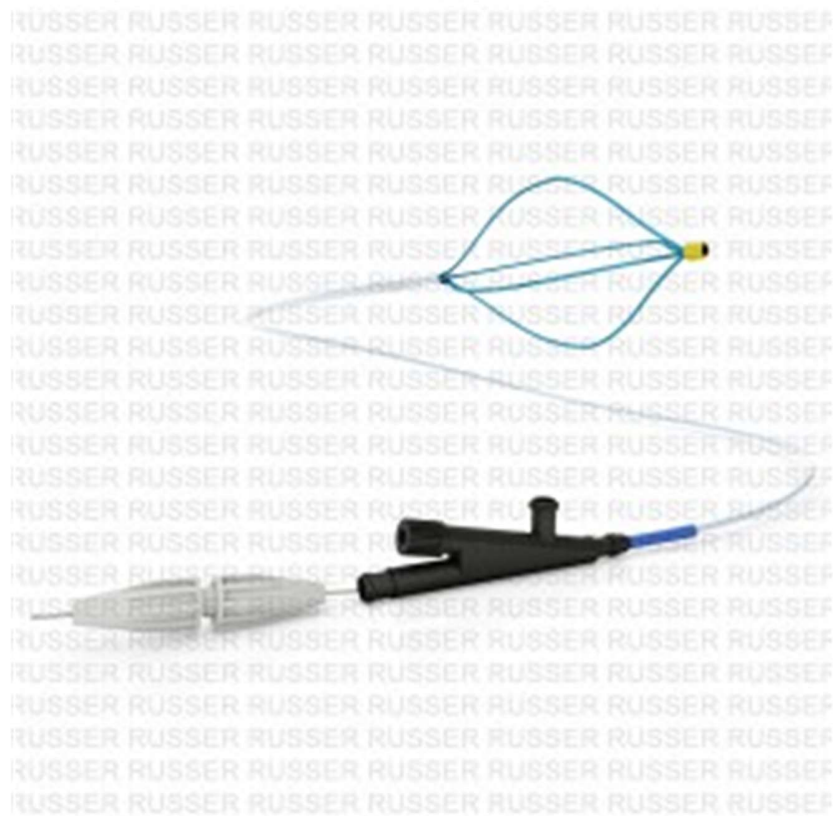

**PINÇA EXTRATORA COM CANAL DE TRABALHO – BASKET – P.PT
803 297 200 31**

Guarde o Manual de Instruções em lugar seguro e de fácil acesso.

ÍNDICE	
INFORMAÇÕES	3
CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO	3
CONDIÇÕES DE TRANSPORTE	3
ADVERTÊNCIA	3
FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	3
APLICAÇÕES	3
MANUAL DE INSTRUÇÕES	3
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	4
COMPOSIÇÃO	4
INDICAÇÃO DE USO	4
CONTRAINDICAÇÃO	4
ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO	4
ACESSÓRIOS	11
PRECAUÇÕES	11
INSTRUÇÃO PARA O USO CORRETO E SEGURO	11
CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO	11
DESEMBALAGEM	12
INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO EQUIPAMENTO	12
INSTRUÇÃO DE USO	12
TÉCNICA CIRÚRGICA	12
DESCARTE	14

INFORMAÇÕES

Nome Comercial: Pinça Extratora com Canal de Trabalho – Basket – P.PT. Nome Técnico: Extrator

Atenção: Produto Estéril. Método de Esterilização: Óxido de Etileno.

PRODUTO DE USO ÚNICO – DESCARTAR APÓS O USO – PROIBIDO REPROCESSAR

Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Guardar a Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Basket, P.PT em sua embalagem original, a qual provê tamanho adequado ao equipamento. Este tipo de armazenamento conserva a Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Basket, P.PT. Armazenar em local seco, sem umidade excessiva e longe da incidência de raios solares e poeira.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

Transportar a Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Basket, P.PT em sua embalagem original para não danificar o cesto de Nitinol.

ADVERTÊNCIA

Somente para uso urológico.

A Russer não assume nenhuma responsabilidade relativa a produtos reutilizados, reprocessados ou reesterilizados, já que a realização dos mesmos pode comprometer a integridade estrutural e/ou levar à falha do dispositivo.

Este dispositivo é fornecido estéril e o fabricante recomenda o uso único.

O uso deste produto deve ser restrito aos profissionais com competência para a utilização do mesmo. Deve-se ter cuidado a fim de prevenir perfuração ou trauma dos revestimentos e tecidos, canais ou ductos associados. A aplicação de força excessiva poderá danificar o dispositivo.

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

A Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Basket, P.PT pode ou não estar acondicionada em blister de PET e posteriormente colocada em embalagem de papel grau cirúrgico ou Tyvek®, e a embalagem secundária será de caixa de papelão em dimensões adequadas para protegê-la de choques e quedas até o momento do uso, contendo:

- 01 Pinça Extratora com Canal de Trabalho - Basket - P.PT, Modelo xxxxxxxxxxxx;
- 01 Manual de Instruções impresso ou para consulta através do caminho eletrônico site: www.russer.com.br/manuais/80329720031.pdf de acordo com a instrução normativa IN nº 4 de 15 de junho de 2012, podendo ser solicitada a via impressa sem custo através do nosso SAC.

APLICAÇÕES

A Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Basket, P.PT tem como finalidade a apreensão, e extração de litíase (cálculos do sistema urinário e biliar) e corpos estranhos através de um só instrumento.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Este manual de instrução tem a finalidade de oferecer informações necessárias para a utilização correta da Pinça

Extratora com Canal de Trabalho, Basket, P.PT. Recomendamos ler cuidadosamente este manual de instruções antes de usar seu equipamento, ele contém especificações e informações necessárias que ajudarão no manuseio do equipamento com segurança e eficácia. Para qualquer dúvida em relação ao produto ou manual de instruções, por favor, entrar em contato com seu representante.

Nota: Guarde o Manual de Instruções em lugar seguro e de fácil acesso.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Basket, P.PT é descrita na figura 1.

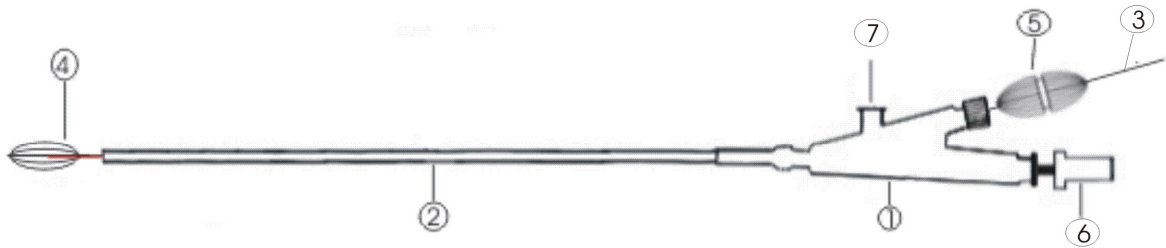


Figura 1 - Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Basket, P.PT.

1. Corpo da basket com entradas para Probe, Basket e encaixe para a irrigação tipo luer lock;
2. Camisa de PTFE;
3. Tensor traseiro da Basket;
4. Basket de Nitinol de 4 fios;
5. Torque;
6. Entrada para Probe e outros acessórios a ser empregado;
7. Canal de irrigação com entrada tipo luer lock.

COMPOSIÇÃO

Camisa – PTFE; Tensor Flexível e Cesto Basket – Nitinol; Corpo da Basket (adaptador com canal de trabalho) – Polietileno grau médico.

INDICAÇÃO DE USO

Indicada para a apreensão, e extração de litíase (cálculos do sistema urinário e biliar) e corpos estranhos.

CONTRAIINDICAÇÃO

É contraindicado em todos os casos onde não possa ser utilizado como procedimento proposto de retirada de litíase e/ou corpo estranho.

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO

A Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Basket, P.PT, possui vários modelos, especificados na tabela 1.

Tabela 1 - Modelos

PINÇA EXTRATORA COM CANAL DE TRABALHO - BAKET - P.PT	
CÓDIGOS	DESCRIÇÃO
BASKET 4 FIOS - FRENCH	
U 2 25 56 4 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 25 60 4 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, 60cm comprimento
U 2 25 40 4 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, 40cm comprimento
U 2 3 40 4 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, 40cm comprimento
U 2 3 56 4 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 3 60 4 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, 60cm comprimento
U 2 45 56 4 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 45 60 4 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, 60cm comprimento
U 2 5 56 4 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, 56cm comprimento
U 2 5 60 4 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, 60cm comprimento
N 2 3 22 4 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, 22cm comprimento
N 2 5 22 4 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, 22cm comprimento
N 2 3 37 4 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
N 2 41 37 4 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
N 2 45 37 4 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
N 2 5 37 4 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, 37cm comprimento
N 2 8 34 4 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, 34cm comprimento
N 2 8 40 4 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, 40cm comprimento
N 2 8 42 4 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, 42cm comprimento
N 2 8 45 4 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, 45cm comprimento
BASKET 4 FIOS TIPLESS - FRENCH	
U 2 25 56 4T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 25 60 4T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, 60cm comprimento
U 2 25 40 4T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, 40cm comprimento
U 2 3 40 4T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Tipless, 40cm comprimento
U 2 3 56 4T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 3 60 4T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Tipless, 60cm comprimento
U 2 45 56 4T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 45 60 4T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, 60cm comprimento
U 2 5 56 4T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 5 60 4T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, Tipless, 60cm comprimento
N 2 3 22 4T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, Tipless, 22cm comprimento
N 2 5 22 4T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, Tipless, 22cm comprimento
N 2 3 37 4T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 41 37 4T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 4 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 45 37 4T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 5 37 4T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 8 34 4T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Tipless, 34cm comprimento
N 2 8 40 4T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Tipless, 40cm comprimento
N 2 8 42 4T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Tipless, 42cm comprimento
BASKET 3 FIOS - FRENCH	
U 2 25 56 3 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, 56cm comprimento
U 2 25 60 3 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, 60cm comprimento
U 2 25 40 3 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, 40cm comprimento
U 2 3 40 3 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, 40cm comprimento
U 2 3 56 3 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, 56cm comprimento
U 2 3 60 3 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, 60cm comprimento
U 2 45 56 3 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, 56cm comprimento
U 2 45 60 3 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, 60cm comprimento
U 2 5 56 3 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fios, 56cm comprimento
U 2 5 60 3 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fios, 60cm comprimento
N 2 3 22 3 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 3 fios, 22cm comprimento
N 2 5 22 3 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 3 fios, 22cm comprimento
N 2 3 37 3 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 3 fios, 37cm comprimento
N 2 41 37 3 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 3 fios, 37cm comprimento
N 2 45 37 3 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 3 fios, 37cm comprimento

N 2 5 37 3 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 3 fios, 37cm comprimento
N 2 8 34 3 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, 34cm comprimento
N 2 8 40 3 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, 40cm comprimento
N 2 8 42 3 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, 42cm comprimento
N 2 8 45 3 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, 45cm comprimento
BASKET 3 FIOS TIPLESS – FRENCH	
U 2 25 56 3T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 25 60 3T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, 60cm comprimento
U 2 25 40 3T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, 40cm comprimento
U 2 3 40 3T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Tipless, 40cm comprimento
U 2 3 56 3T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 3 60 3T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Tipless, 60cm comprimento
U 2 45 56 3T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 45 60 3T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, 60cm comprimento
U 2 5 56 3T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 5 60 3T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fios, Tipless, 60cm comprimento
N 2 3 22 3T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 3 fios, Tipless, 22cm comprimento
N 2 5 22 3T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 3 fios, Tipless, 22cm comprimento
N 2 3 37 3T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 3 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 41 37 3T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 3 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 45 37 3T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 5 37 3T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 3 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 8 34 3T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Tipless, 34cm comprimento
N 2 8 40 3T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Tipless, 40cm comprimento
N 2 8 42 3T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Tipless, 42cm comprimento
N 2 8 45 3T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Tipless, 45cm comprimento
BASKET 6 FIOS – FRENCH	
U 2 25 56 6 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, 56cm comprimento
U 2 25 60 6 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, 60cm comprimento
U 2 25 40 6 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, 40cm comprimento
U 2 3 40 6 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, 40cm comprimento
U 2 3 56 6 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, 56cm comprimento
U 2 3 60 6 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, 60cm comprimento
U 2 45 56 6 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, 56cm comprimento
U 2 45 60 6 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, 60cm comprimento
U 2 5 56 6 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, 56cm comprimento
U 2 5 60 6 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, 60cm comprimento
N 2 3 22 6 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, 22cm comprimento
N 2 5 22 6 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, 22cm comprimento
N 2 3 37 6 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, 37cm comprimento
N 2 41 37 6 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 6 fios, 37cm comprimento
N 2 45 37 6 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 6 fios, 37cm comprimento
N 2 5 37 6 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, 37cm comprimento
N 2 8 34 6 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, 34cm comprimento
N 2 8 40 6 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, 40cm comprimento
N 2 8 42 6 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, 42cm comprimento
N 2 8 45 6 C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, 45cm comprimento
BASKET 6 FIOS TIPLESS – FRENCH	
U 2 25 56 6T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 25 60 6T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 60cm comprimento
U 2 25 40 6T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 40cm comprimento
U 2 3 40 6T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, Tipless, 40cm comprimento
U 2 3 56 6T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 3 60 6T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, Tipless, 60cm comprimento
U 2 45 56 6T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 45 60 6T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 60cm comprimento
U 2 5 56 6T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 56cm comprimento
U 2 5 60 6T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 60cm comprimento
N 2 3 22 6T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, Tipless, 22cm comprimento
N 2 5 22 6T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 22cm comprimento

N 2 3 37 6T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 41 37 6T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 45 37 6T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 5 37 6T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, Tipless, 37cm comprimento
N 2 8 34 6T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, 34cm comprimento
N 2 8 40 6T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, 40cm comprimento
N 2 8 42 6T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, 42cm comprimento
N 2 8 45 6T C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, 45cm comprimento
BASKET 4 FIOS HEXAGONAL - FRENCH	
U 2 25 56 4H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 25 60 4H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Hexagonal, 60cm comprimento
U 2 25 40 4H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Hexagonal, 40cm comprimento
U 2 3 40 4H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Hexagonal, 40cm comprimento
U 2 3 56 4H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 3 60 4H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Hexagonal, 60cm comprimento
U 2 45 56 4H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 45 60 4H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, Hexagonal, 60cm comprimento
U 2 5 56 4H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 5 60 4H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, Hexagonal, 60cm comprimento
N 2 3 22 4H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, Hexagonal, 22cm comprimento
N 2 5 22 4H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, Hexagonal, 22cm comprimento
N 2 3 37 4H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, Hexagonal, 37cm comprimento
N 2 41 37 4H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 4 fios, Hexagonal, 37cm comprimento
N 2 45 37 4H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 4 fios, Hexagonal, 37cm comprimento
N 2 5 37 4H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, Hexagonal, 37cm comprimento
N 2 8 34 4H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Hexagonal, 34cm comprimento
N 2 8 40 4H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Hexagonal, 40cm comprimento
N 2 8 42 4H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Hexagonal, 42cm comprimento
N 2 8 45 4H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Hexagonal, 45cm comprimento
BASKET 4 FIOS TIPLESS HEXAGONAL- FRENCH	
U 2 25 56 4TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 25 60 4TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 60cm comprimento
U 2 25 40 4TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 40cm comprimento
U 2 3 40 4TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 40cm comprimento
U 2 3 56 4TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 3 60 4TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 60cm comprimento
U 2 45 56 4TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 45 60 4TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 60cm comprimento
U 2 5 56 4TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 5 60 4TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 60cm comprimento
N 2 3 22 4TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 22cm comprimento
N 2 5 22 4TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 22cm comprimento
N 2 3 37 4TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 37cm comprimento
N 2 41 37 4TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 37cm comprimento
N 2 45 37 4TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 37cm comprimento
N 2 5 37 4TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 37cm comprimento
N 2 8 34 4TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 34cm comprimento
N 2 8 40 4TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 40cm comprimento
N 2 8 42 4TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Tipless, Hexagonal, 42cm comprimento
BASKET 3 FIOS HEXAGONAL - FRENCH	
U 2 25 56 3H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 25 60 3H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Hexagonal, 60cm comprimento
U 2 25 40 3H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Hexagonal, 40cm comprimento
U 2 3 40 3H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Hexagonal, 40cm comprimento
U 2 3 56 3H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 3 60 3H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Hexagonal, 60cm comprimento
U 2 45 56 3H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 45 60 3H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, Hexagonal, 60cm comprimento
U 2 5 56 3H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fios, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 5 60 3H C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fios, Hexagonal, 60cm comprimento

U 2 45 60 6TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 60cm comprimento
U 2 5 56 6TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 56cm comprimento
U 2 5 60 6TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 60cm comprimento
N 2 3 22 6TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 22cm comprimento
N 2 5 22 6TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 22cm comprimento
N 2 3 37 6TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 37cm comprimento
N 2 41 37 6TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 37cm comprimento
N 2 45 37 6TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 37cm comprimento
N 2 5 37 6TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 37cm comprimento
N 2 8 34 6TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 34cm comprimento
N 2 8 40 6TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 40cm comprimento
N 2 8 42 6TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 42cm comprimento
N 2 8 45 6TH C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, Hexagonal, 45cm comprimento
BASKET 4 FIOS ELIPTICA – FRENCH	
U 2 25 56 4E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 25 60 4E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 60cm comprimento
U 2 25 40 4E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 40cm comprimento
U 2 3 40 4E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 40cm comprimento
U 2 3 56 4E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 3 60 4E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 60cm comprimento
U 2 45 56 4E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 45 60 4E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 60cm comprimento
U 2 5 56 4E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 5 60 4E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 60cm comprimento
N 2 3 22 4E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 22cm comprimento
N 2 5 22 4E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 22cm comprimento
N 2 3 37 4E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 37cm comprimento
N 2 41 37 4E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 37cm comprimento
N 2 45 37 4E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 37cm comprimento
N 2 5 37 4E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 37cm comprimento
N 2 8 34 4E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 34cm comprimento
N 2 8 40 4E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 40cm comprimento
N 2 8 42 4E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 42cm comprimento
N 2 8 45 4E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Eliptica, 45cm comprimento
BASKET 4 FIOS TIPLESS ELIPTICA- FRENCH	
U 2 25 56 4TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 25 60 4TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 60cm comprimento
U 2 25 40 4TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 40cm comprimento
U 2 3 40 4TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 40cm comprimento
U 2 3 56 4TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 3 60 4TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 60cm comprimento
U 2 45 56 4TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 45 60 4TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 60cm comprimento
U 2 5 56 4TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 5 60 4TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 60cm comprimento
N 2 3 22 4TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 22cm comprimento
N 2 5 22 4TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 22cm comprimento
N 2 3 37 4TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 37cm comprimento
N 2 41 37 4TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 37cm comprimento
N 2 45 37 4TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 37cm comprimento
N 2 5 37 4TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 37cm comprimento
N 2 8 34 TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 34cm comprimento
N 2 8 40TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 40cm comprimento
N 2 8 42 TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 4 fios, Tipless, Eliptica, 42cm comprimento
BASKET 3 FIOS ELIPTICA – FRENCH	
U 2 25 56 3E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 25 60 3E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Eliptica, 60cm comprimento
U 2 25 40 3E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Eliptica, 40cm comprimento
U 2 3 40 3E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Eliptica, 40cm comprimento
U 2 3 56 3E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Eliptica, 56cm comprimento

U 2 3 60 3E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Eliptica,60cm comprimento
U 2 45 56 3E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, elíptica, 56cm comprimento
U 2 45 60 3E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, Eliptica,60cm comprimento
U 2 5 56 3E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fios, Eliptica,56cm comprimento
U 2 5 60 3E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fiosEliptica,60cm comprimento
N 2 3 22 3E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 3 fiosEliptica,22cm comprimento
N 2 5 22 3E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 3 fios, Eliptica,22cm comprimento
N 2 3 37 3E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 3 fiosEliptica,37cm comprimento
N 2 41 37 3E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 3 fiosEliptica,37cm comprimento
N 2 45 37 3E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 3 fiosEliptica,37cm comprimento
N 2 5 37 3E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 3 fios, Eliptica,37cm comprimento
N 2 8 34 3E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Eliptica,34cm comprimento
N 2 8 40 3E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Eliptica,40cm comprimento
N 2 8 42 3E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Eliptica,42cm comprimento
N 2 8 45 3E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Eliptica,45cm comprimento
BASKET 3 FIOS TIPLESS ELIPTICA - FRENCH	
U 2 25 56 3TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,56cm comprimento
U 2 25 60 3TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,60cm comprimento
U 2 25 40 3TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,40cm comprimento
U 2 3 40 3TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica, 40cm comprimento
U 2 3 56 3TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 3 60 3TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 3 fios, TipleSs, Eliptica,60cm comprimento
U 2 45 56 3TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,56cm comprimento
U 2 45 60 3TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,60cm comprimento
U 2 5 56 3TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,56cm comprimento
U 2 5 60 3TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,60cm comprimento
N 2 3 22 3TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,22cm comprimento
N 2 5 22 3TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,22cm comprimento
N 2 3 37 3TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,37cm comprimento
N 2 41 37 3TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,37cm comprimento
N 2 45 37 3TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,37cm comprimento
N 2 5 37 3TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,37cm comprimento
N 2 8 34 3TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,34cm comprimento
N 2 8 40 3TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,40cm comprimento
N 2 8 42 3TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,42cm comprimento
N 2 8 45 3TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 3 fios, Tipless, Eliptica,45cm comprimento
BASKET 6 FIOS ELIPTICA- FRENCH	
U 2 25 56 6E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, Eliptica,56cm comprimento
U 2 25 60 6E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, Eliptica,60cm comprimento
U 2 25 40 6E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, Eliptica ,40cm comprimento
U 2 3 40 6E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, Eliptica ,40cm comprimento
U 2 3 56 6E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 3 60 6E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, Eliptica, 60cm comprimento
U 2 45 56 6E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, Eliptica,56cm comprimento
U 2 45 60 6E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, Eliptica,60cm comprimento
U 2 5 56 6E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Eliptica,56cm comprimento
U 2 5 60 6E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Eliptica ,60cm comprimento
N 2 3 22 6E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, Eliptica, 22cm comprimento
N 2 5 22 6E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, Eliptica,22cm comprimento
N 2 3 37 6E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, Eliptica, 37cm comprimento
N 2 41 37 6E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 6 fios, Eliptica, 37cm comprimento
N 2 45 37 6E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 6 fios, Eliptica, 37cm comprimento
N 2 5 37 6E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, Eliptica, 37cm comprimento
N 2 8 34 6E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Eliptica, 34cm comprimento
N 2 8 40 6E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Eliptica, 40cm comprimento
N 2 8 42 6E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Eliptica, 42cm comprimento
N 2 8 45 6E C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Eliptica ,45cm comprimento
BASKET 6 FIOS TIPLESS ELIPTICA - FRENCH	
U 2 25 56 6TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica,56cm comprimento
U 2 25 60 6TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, elíptica, 60cm comprimento

U 2 25 40 6TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 2.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica,40cm comprimento
U 2 3 40 6TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, Tipless, elíptica ,40cm comprimento
U 2 3 56 6TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica,56cm comprimento
U 2 3 60 6TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 3Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica ,60cm comprimento
U 2 45 56 6TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica,56cm comprimento
U 2 45 60 6TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 4.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica ,60cm comprimento
U 2 5 56 6TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica, 56cm comprimento
U 2 5 60 6TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica,60cm comprimento
N 2 3 22 6TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica ,22cm comprimento
N 2 5 22 6TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica I, 22cm comprimento
N 2 3 37 6TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø3Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica ,37cm comprimento
N 2 41 37 6TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.1Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica ,37cm comprimento
N 2 45 37 6TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø4.5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica ,37cm comprimento
N 2 5 37 6TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø5Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica I, 37cm comprimento
N 2 8 34 6TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica,34cm comprimento
N 2 8 40 6TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica,40cm comprimento
N 2 8 42 6TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica,42cm comprimento
N 2 8 45 6TE C	Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Ø 8Fr, Basket 6 fios, Tipless, Eliptica ,45cm comprimento

CODIFICAÇÃO

Significado das letras no final dos códigos:

Exemplos: X X XX XX T = ...Tipless...

X X XX XX TE = ...Tipless, Eliptica

LEGENDA

E – Eliptica

T – Tipless

C – PTFE

H – Hexagonal

ACESSÓRIOS

Não se aplica.

PRECAUÇÕES

Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada ou danificada.

Não utilizar o produto com prazo de validade vencido.

O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim senão aquele que especificamente se destina.

Prepare todos os materiais e equipamentos de proteção pessoal que serão utilizados com o instrumento de acordo com os seus respectivos manuais de instrução. Os equipamentos de proteção pessoal apropriados podem incluir: Proteção ocular, máscara facial, roupas resistentes à umidade e luvas resistentes a produtos químicos.

Após a retirada dos produtos da embalagem, inspecione-os a fim de detectar a existência de dobras, torções ou outros danos. Se for detectada qualquer anomalia que impossibilite o seu funcionamento em boas condições os produtos não devem ser utilizados. Entrar em contato com a Russer.

Certificar-se de que a descrição e dimensões do produto são adequadas ao procedimento a ser realizado.

Para manter o dispositivo livre de contaminantes, use luvas sem pó e abra-o em ambiente o mais limpo possível.

INSTRUÇÃO PARA O USO CORRETO E SEGURO

CONDIÇÕES DE MANUPULAÇÃO

Produto para uso Médico Hospitalar que deve ser manuseado e utilizado somente por profissionais devidamente habilitados e/ou supervisão de um médico. Produto médico para uso único.

Esterilizado por gás de Óxido de Etileno. Não reesterilize ou reutilize. Não utilizar se a embalagem estiver violada.

Se for detectado qualquer problema com a Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Basket, P.PT que impossibilite o seu funcionamento, o produto deve ser descartado e substituído.

As instruções presentes neste manual foram feitas para orientação. Este manual não substitui treinamentos ou cursos de intervenção cirúrgica.

DESEMBALAGEM

Desembale cuidadosamente a Pinça Extratora com Canal de Trabalho, Basket, P.PT e verifique se o dispositivo se encontra completo e se não há danos.

Antes do procedimento, inspecionar o equipamento:

- Verificar se a embalagem do produto está danificada ou aberta, caso ocorra, descarte imediatamente o produto;
- Certificar de que os componentes do equipamento estão montados corretamente;
- Verificar as condições do produto: se a cesta não se encontra quebrada ou amassada, se o movimento de abertura e fechamento da cesta de nitinol está funcionando;
- Recusar o equipamento se os fios da cesta apresentar deformações ou alterações no formato.

INSTALAÇÃO E MONTAGEM DO EQUIPAMENTO

A pinça é fornecida montada e pronta para uso. Caso houver alguma dúvida entrar em contato com seu Representante.

INSTRUÇÃO DE USO

O profissional deve desenvolver um método de aplicação, que segundo sua experiência seja o mais adequado, levando em conta o bem-estar e a segurança do paciente.

TÉCNICA CIRÚRGICA

1. Preparação do Instrumento:
 - Utilizando uma técnica asséptica, remover o instrumento da embalagem;
 - Avance lentamente a pinça para extração de cálculo fechada pelo canal de trabalho do endoscópio até que a mesma apareça na ponta distal do endoscópio.
2. Procedimento de retirada do cálculo:
 - O procedimento deve ser realizado utilizando técnicas assépticas apropriadas;
 - Prepare o local, conforme necessário. Deve ser administrada uma anestesia adequada antes do procedimento.
 - Antes de introduzir a pinça verifique se a cesta está recolhida (figura 2);

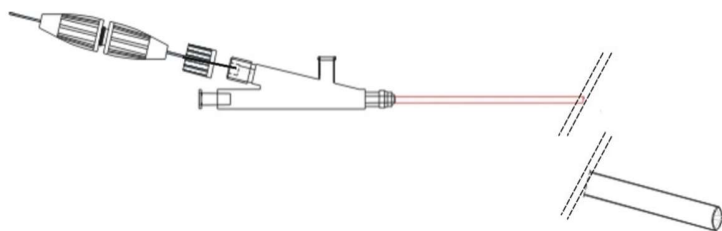
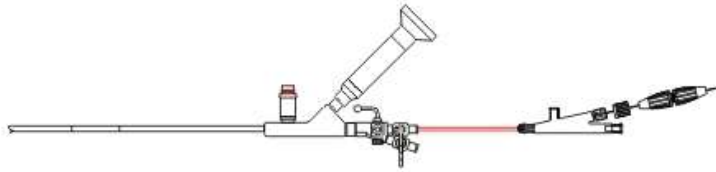
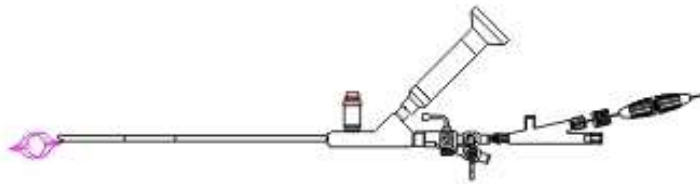


Figura 2

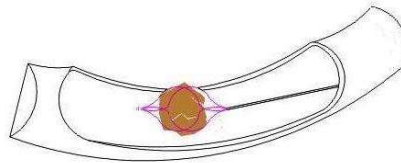
- Introduza a ponta da pinça recolhida (figura 3) no canal de trabalho do endoscópio;

**Figura 3**

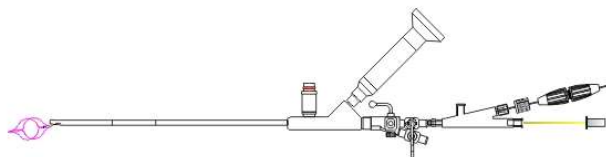
- Avance lentamente pelo canal de trabalho até a mesma aparecer na ponta distal do endoscópio (figura 4);

**Figura 4**

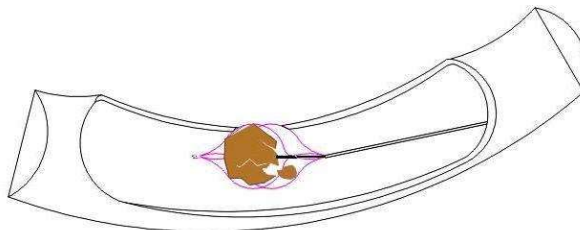
- Avance lentamente a pinça pelo canal de trabalho até encontrar o cálculo ou corpo estranho a ser retirado;
- Uma vez encontrado o cálculo ou corpo estranho, deve apreendê-lo na cesta retraindo a cesta e girando o torque para fixar no cálculo ou corpo estranho (figura 5);

**Figura 5**

- Constatado a apreensão do cálculo, introduzir o Probe pelo canal de trabalho do endoscópio (fig.6);

**Figura 6**

- Avance lentamente o Probe até encontrar o cálculo apreendido (fig.6), acionar o Litotriptor para fragmentar o cálculo;

**Figura 7**

- Após a fragmentação, retire o Probe do canal do endoscópio, e depois a cesta com o cálculo apreendido ou corpo estranho;
- Se for necessária mais retirada de cálculos ou corpos estranhos, repita o procedimento.

DESCARTE

Considerando que o produto entra em contato com fluidos corporais, existe o risco de contaminação biológica e transmissão de doenças virais. Portanto, após o uso o mesmo deve ser tratado como material potencialmente contaminante.

Seguir as regras para descarte de produtos potencialmente contaminantes, de acordo com os padrões hospitalares.

Responsável Legal: Juan Ruben Calbucoy Oliarte

Responsável Técnico: Carlos Roberto Weffort - CREA-SP 0601559401

Registro ANVISA nº: 803 297 200 31

Fabricado e distribuído por: Russer Brasil Ltda.

Rua Antônia Martins Luiz, Nº 589 – Distrito Industrial João Narezzi – Indaiatuba – SP

SAC: Serviço de atendimento ao consumidor – 0800 17 00 07.